

歯科技工士が開発した
はめて寝るだけで不快な音と、歯の損傷を防ぐ奥歯保護具

歯ぎしり
STOP!

Dr.歯ぎしりくん®

下の奥歯にはめるだけで、歯ぎしりや噛み締めから
あなたの大切な歯を守ります。

**睡眠時に装着するだけで、
歯ぎしりや噛み締めから、
あなたの大切な歯を守ります。**

睡眠時、Dr.歯ぎしりくんを装着することで
歯と歯が直接触れ合わず、歯ぎしり独特の
「ギリギリ」「キリキリ」という軌音を防ぎます。

また睡眠中の歯ぎしりや噛み締めは、起きて
いる時の約2倍もの力が歯や顎にかかり、歯を
痛めるだけでなく、身体に様々な悪い影響を与
えます。Dr.歯ぎしりくんを歯を保護しましょう。

**自分専用のDr.歯ぎしりくんが
簡単に作れます。**

Dr.歯ぎしりくんは、下の奥歯に装着し自分の
歯型に成形するので、ぴったりフィットします。
成形に失敗した場合は、お湯に浸すことで何度
でも繰り返し成形し直すことができます。



特許出願中商品

日本製

個装サイズ	W95×H120×D22mm
内箱サイズ	W125×H98×D120mm
梱包サイズ	W620×H115×D266mm
梱包入数	100 (10×10)

成形前




歯型のついていない
Dr.歯ぎしりくん

お湯で柔らかくする




61～63℃のお湯にDr.歯ぎしり
くんを浸し(約45秒)、柔らかく
なったら取り出します。サー
モチェッカーの先端部に引
かけると安全に取り出せます。

歯型をつける

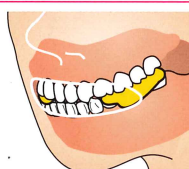

鏡を見ながら下の奥歯に装着
し、しっかりと噛みしめます。
噛み合わせの悪い場合は、お
湯に入れると成形し直すこと
ができます。

歯型の固定

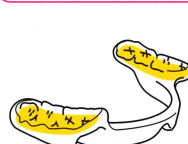

歯型がしっかりついたら、Dr.
歯ぎしりくんを外してください。
温度が下がるにつれて自然に
形が固定されます。

成形後



歯型のついた自分専用の
Dr.歯ぎしりくん

装着時の違和感をなくした極薄構造

薄くコンパクトな構造とスムーズなラウンド処理を行った
形状により、睡眠時の異物感を大幅に軽減しています。


使い方は下の奥歯にはめるだけで簡単

下の奥歯に装着するので、呼吸の妨げにもなりません。また
舌の下に入りますので、睡眠中に飲み込むことはありません。


耐久性、安全性にも自信があります

噛む部分にエラストマを使用し、二層構造とする
ことで耐久性を高めています。

エラストマ

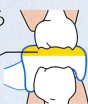

Dr.歯ぎしりくんは消耗品ですので、2～3ヶ月を目途にお取り替えすること
をおすすめします。(個人により、多少の違いがあります。)

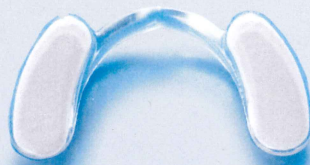

●サーモチェッカー



●簡易ケース



●Dr.歯ぎしりくん本体



歯科技工歴30年の
経験を生かし開発しました



歯科技工士 吉田信隆

価格 1,900円(税別)

株式会社フクヤマ ヘルスケア事業部

〒130-0026 東京都墨田区両国4-34-15 ☎0120-941-361 平日9:00～17:00

http://www.fuku-yama.co.jp



4 529796 134844